



Entfernt gewöhnliche  
Warzen & Dornwarzen

#### Was ist Wortie und wofür wird es angewendet?

Wortie ist ein einfach anzuwendender Applikator zur „Vereisung“ von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen (Verrucae) ähnlich der Kryotherapie (Kältetherapie), die von Ärzten angewendet wird. Warzen sind kleine Hautwucherungen, die durch den Humanpapillomavirus (HPV) verursacht werden.

**Warzen** entwickeln sich häufig an den Fingern oder auf den Handrücken, den Knien und den Ellbogen. Eine gewöhnliche Warze lässt sich an der rauen, „karfiolartigen“ Oberfläche erkennen. Das Warzenvirus, das besonders ansteckend ist, kann durch direkten Kontakt mit einer infizierten Stelle von einer Person auf eine andere oder von einer Körperstelle auf eine andere übertragen werden.

**Dornwarzen** (Verrucae) sind den gewöhnlichen Warzen ähnlich, sie treten aber nur an der Fußsohle oder unter den Zehen auf. Sie sind normalerweise schmerzhaft und sehen oft wie ein kleiner weißer Hautring mit schwarzen Punkten in der Mitte aus. Dornwarzen sind ebenfalls ansteckend und können durch Kontakt mit einer feuchten Stelle, wie etwa einem Fußboden, auf andere Personen übertragen werden.

#### Wie wirkt Wortie?

Mit seinem einzigartigen Präzisionsapplikator vereist Wortie die gewöhnliche Warze oder Dornwarze präzise und bis zur Wurzel. Die gewölbte Form des Wortie-Kryoapplikators gestattet eine genaue, auf die Warze beschränkte Anwendung ohne die gesunde Haut in Mitleidenschaft zu ziehen, was zu einer schmerzfreieren Anwendung führt.



#### Präzisionsapplikator

- Gezielte Anwendung ausschließlich auf der Warze
- Optimale Vereisungsleistung
- Kein direkter Kontakt der Haut mit dem Gas

Bei der Anwendung eines Kryotherapie-Applikators zur Entfernung von Warzen kann sich der behandelte Bereich vorübergehend weiß verfärben. Nach dem Auftauen der vereisten Stelle kann es dann zu einer Rötung kommen. Es kann sich als Folge der Vereisung auch eine Blase unterhalb der behandelten Warze bilden.

Die Warze wird innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage nach und nach verschwinden oder ganz abfallen. Darunter wird sich neue, gesunde Haut bilden. Eine Anwendung sollte für die erfolgreiche Entfernung einer gewöhnlichen Warze oder Dornwarze ausreichend sein. Falls eine zweite Anwendung erforderlich sein sollte, sollten zwischen zwei Anwendungen mindestens 14 Tage liegen. Nach jeder Anwendung die Metallspitze vor einer neuerlichen Anwendung auf anderen Warzen oder Dornwarzen wieder auf Raumtemperatur kommen lassen. In manchen Fällen kann es hilfreich sein, die Warze vor der Anwendung von Wortie einige Minuten in warmem Wasser einzuweichen, um das Durchdringen durch die Hornhaut, die sich auf der Warze gebildet hat, zu erleichtern.

#### Warum Wortie?

Bei Wortie kommt eine patentierte Technologie zum Einsatz und diese bietet eine rasche und effektive Behandlung für gewöhnliche Warzen und Dornwarzen.

#### Wortie ist schnell

Wortie bietet eine rasche und einfache Form der Behandlung gewöhnlicher Warzen und Dornwarzen. Wortie kann direkt aus der Packung ohne umständlichen Zusammenbau von Schaumstoffapplikatoren und Kleinteilen angewendet werden. Nach nur 3 Sekunden Vorbereitungszeit kann das Produkt auf der Warze angewendet werden.

#### Wortie ist sicher

Das besondere/patentierte Design von Wortie hat den Vorteil, dass die Behandlung einer gewöhnlichen Warze oder Dornwarze rascher erfolgen, aber ein direkter Kontakt der Haut mit dem Flüssiggas im Aerosol vermieden werden kann. Da bei Wortie die Vereisung mit einem Applikator aus Metall erfolgt, kann die Vereisungsstärke durch den während der Anwendung ausgeübten Druck auf die Dose kontrolliert werden. Stärkerer Druck bedeutet, dass eine größere Fläche des Metallapplikators mit der Haut in Kontakt ist, und damit auch eine größere Vereisungsfläche. Bei nur leichtem Druck, wird der Kontakt auf ein Minimum beschränkt und so können kleinere Warzen behandelt werden. Wortie stellt sich automatisch wieder in Stellung „0“ zurück, um eine versehentliche Aktivierung während der Anwendung zu vermeiden. Wortie ist für Kinder ab einem Alter von 4 Jahren geeignet.


#### Wortie ist wirksam

Wortie hat in mehreren Untersuchungen eine ausgezeichnete Vereisungsstärke gezeigt.

## Optimale Vereisungsleistung

- Besonders einfache Handhabung
- Keine Verletzung der umliegenden Haut
- Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

#### Wie ist Wortie anzuwenden?

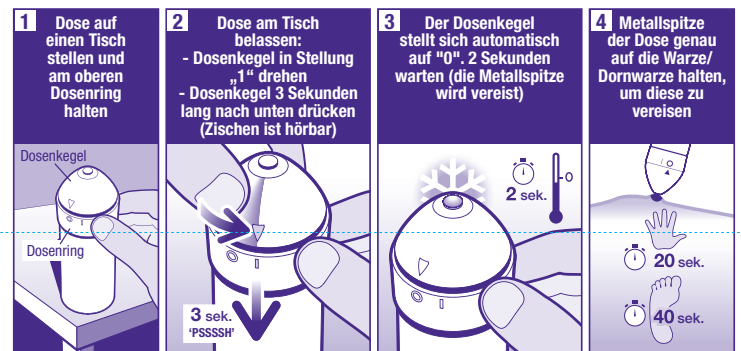

1. Verschluss abnehmen und Dose auf einen Tisch oder eine ebene Fläche stellen und am oberen Dosenring festhalten.
2. Dosenring mit Daumen und Zeigefinger festhalten, Dosenkegel mit der anderen Hand in Stellung „1“ drehen und den Dosenkegel 3 Sekunden lang fest nach unten drücken, ohne dabei die Metallspitze zu berühren. Sie werden ein zischendes Geräusch als Zeichen der Aktivierung hören.
3. **Achten Sie darauf, dass sich der Dosenkegel automatisch wieder auf „0“ zurückstellt, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.** Warten Sie 2 Sekunden, während sich die Metallspitze vereist.
4. Halten Sie die vereiste Metallspitze direkt und genau entweder 20 Sekunden lang auf die gewöhnliche Warze (Hand) oder 40 Sekunden lang auf die Dornwarze (Fuß), um so die Warze/Dornwarze zu vereisen.

Wenn Sie den gekühlten Wortie-Applikator auf gewöhnliche Warzen oder Dornwarzen auflegen, könnte es aufgrund des Vereisungsprozesses zu einem leichten Schmerzgefühl kommen. Das ist normal und sollte innerhalb weniger Stunden wieder abklingen.

#### Vorsichtsmaßnahmen

Wortie darf nicht angewendet werden:

- Falls der Dosenkegel in Stellung „1“ steckengeblieben ist.
- Bei Kindern unter einem Alter von 4 Jahren.
- Im Gesicht, in den Achselhöhlen, auf der Brust, am Gesäß oder im Genitalbereich.
- Auf Muttermalen, Leberflecken, behaarten Warzen oder irgendwelchen anderen Hautmalen.
- An Stellen mit empfindlicher, entzündeter, geschädigter, geschnittener, abgeschürfter, erkrankter oder juckender Haut.
- Wenn Sie Diabetes haben oder an einer schlechten Durchblutung der Hände oder Füße leiden.

Falls Sie nicht sicher sind, ob die Hautveränderung tatsächlich eine gewöhnliche Warze oder Dornwarze ist, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.

#### Warnhinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behältnis steht unter Druck: kann bei Erwärmung explodieren. Nicht anstecken oder entzünden, auch nicht nach erfolgter Anwendung. Von Wärmequellen/Funken/offenem Feuer/heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen. Nicht in offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen. Vor Sonnenlicht schützen.

Bei Kindern muss aus Sicherheitsgründen die Anwendung immer durch einen Erwachsenen erfolgen. Beim Andrücken des Applikators auf die gewöhnliche Warze oder Dornwarze darf kein übermäßiger Druck ausgeübt werden. Der Applikator sollte maximal 20 Sekunden (gewöhnliche Warze) / 40 Sekunden (Dornwarze) angewendet werden. Bei Anwendung bei mehr als einer Person muss der Applikator nach jeder Anwendung mit einem kleinen mit Alkohol getränkten Tuch gereinigt werden. Bei mehreren gewöhnlichen Warzen oder Dornwarzen in unmittelbarer Nähe, sollte jeweils immer nur eine behandelt werden.

#### Nebenwirkungen

- Wie bei allen Kryotherapien zur Entfernung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen, kann sich die Haut vorübergehend weiß verfärben.
- Die angegebene Anwendungsdauer (20 Sekunden für gewöhnliche Warzen / 40 Sekunden für Dornwarzen) ist genau einzuhalten, um lokale Gewebeschäden zu vermeiden.
- Blasen als Folge einer Behandlung einer größeren oder hartnäckigeren Warze können mit stärkeren Unannehmlichkeiten verbunden sein.
- Nach dem Ablösen der Warze, kann ein Pigmentverlust oder eine kleine Narbe auf der Hautstelle auftreten.
- Die Anwendung von Kryotherapie-Präparaten zur Vereisung von Warzen kann zu leichten Brandwunden aufgrund der niedrigen Vereisungstemperatur führen. Falls die Beschwerden sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.

#### Was Wortie enthält:

Dimethylether

#### Inhalt:

50 ml  
Reicht für 18 Anwendungen



Letzte Überarbeitung: Oktober 2014

Ein Video mit Anleitungen zur Anwendung finden Sie unter [www.wortie.at](http://www.wortie.at)

#### Hersteller:



YouMedical BV, Rijnsburgstraat 9-11,  
1059 AT Amsterdam, Niederlande

#### Vertrieb:

Kwizda Pharma GmbH,  
Effingergasse 21,  
1160 Wien